

Neodrives Tetra

– Zusatzblatt –

Bei dem Modell Neodrives Tetra ist die Schiebehilfe serienmäßig deaktiviert, sodass ein Rückwärtsfahren nicht möglich ist. Diese Funktion kann aber jederzeit über das Menü wieder aktiviert werden.

Wir empfehlen aber nur auf gerader Strecke rückwärts zu fahren. Bitte benutzen Sie den Rückwärtsgang nur mit äußerster Vorsicht und denken daran, mit der Feststellbremse am Rahmen zu bremsen oder die Rücktrittbremse sofort wieder einzuschalten.

The pushing aid is standard deactivated on the model Neodrives Tetra so that reverse driving is not possible. This function can also be activated anytime via the menu. We recommend to drive only on straight road backwards. Please use the reverse with extreme caution and remember to brake with the parking brake on the frame or the pedal brake immediately back on.

- 1) Ein- und Ausschaltknopf bzw. MENÜ
- 2) Unterstützungsstufen erhöhen durch Antippen (für Schiebehilfe nach vorne länger gedrückt halten)
- 3) Unterstützungsstufen verringern durch Antippen (bei eingeschalteter Schiebehilfe fährt es rückwärts; länger gedrückt halten)

- 1) *ON-OFF switch or MENU*
- 2) *Support levels increase by tapping (for pushing aid forwards held longer)*
- 3) *Support levels reduce by tapping (with active pushing aid it is reversing; held longer)*

